

LIVIPRO® Community Mask

Aus was besteht unsere Maske:

- Die LIVIPRO® Maske besteht aus 3 Schutzschichten und ist sehr hautverträglich.

Was kann unsere Maske:

- Die LIVIPRO® (Liquid Virus Protection) Maske schützt ihren Träger und dessen Umfeld vor einer Infektion durch Bakterien und Viren. Sie erfüllt somit ein hohes Level einer Hygiene- und Atemschutzmaske in Einem.
- Die LIVIPRO® Maske ist antiviral und antibakteriell ausgerüstet.
- Die LIVIPRO® Maske hat eine Schutzzeit von bis zu 9 Stunden pro Tragesequenz je nach körperlicher Anstrengung. Wird diese Zeitdauer überschritten, kann der Atemwiderstand etwas zunehmen.
- Für den täglichen Gebrauch empfehlen wir 2 Masken.

Wie wurde unsere Maske geprüft:

- Die LIVIPRO® Maske erreicht eine sehr hohe Partikelfiltrationseffizienz gemäss EMPA Prüfbericht.
- Die LIVIPRO® Maske wurde von der folgenden Prüfungsanstalt getestet:
 - o **EMPA** Swiss Federal Laboratories for Materials, Science and Technology
Ergebnis: Das Prüfobjekt entspricht der Empfehlung der Nationalen COVID-19 Science Task Force

Wie wird unsere Maske gewaschen:

- Für einen schonenden Waschgang empfehlen wir 40 - 60 Grad mit Pulver-Vollwaschmittel
- Die LIVIPRO® Maske muss bei Verschmutzung bei 40 - 60 Grad, mit herkömmlichem Pulver-Vollwaschmittel, gewaschen werden. Dieser Vorgang kann mit einer Maske bis zu 50 Mal wiederholt werden, ohne dass die Schutzleistung abnimmt.
- Die LIVIPRO® Maske verursacht bis zu 540 Mal weniger Abfall gegenüber herkömmlichen Einwegmasken (Annahme: Verbrauch von 3 Einwegmasken pro Tag)
- Zusätzlich empfehlen wir die Maske in einem Waschbeutel zu waschen

Wie wird unsere Maske gelagert:

- Nach dem Tragen sollte die Maske unberührt in einer Tasche 6-9h liegen.
- Nach dem Tragen sollte die Maske in einer Hülle aufbewahrt werden, falls sie nicht an einem sicheren Ort ausgelüftet werden kann.
- Die Maske soll trocken und gut belüftet gelagert werden.

Wie zieht man unsere Masken an:

- Die Maske sollte nur an den Elastik Bändern montiert und demontiert werden.
- Vor dem Anziehen und nach dem Ablegen müssen die Hände gut gewaschen oder desinfiziert werden
- Die Maske nur beim ersten Einstellen oder nach einem Waschgang auf der Vorderseite berühren.

Die LIVIPRO® Maske wird von der
UNIVERSAL REUSABLE PACKAGING GmbH
Hauptstrasse 137E
8274 Tägerwilen
hergestellt und ist ein Schweizer Qualitätsprodukt